



De cassettes desinfecteren

Gebruik voor het desinfecteren van de cassettes uitsluitend door Agfa goedgekeurde desinfecterende middelen (zie de lijst met goedgekeurde desinfecterende middelen). Als u van plan bent om andere desinfecterende middelen te gebruiken, hebt u vooraf de goedkeuring van Agfa nodig omdat de meeste desinfecterende middelen de cassette kunnen beschadigen. UV-desinfectie is ook niet toegestaan.

Zie de gebruiksinstructies van het desinfecterende middel voor gedetailleerde informatie over het aanbrengen ervan.

Veiligheidsinstructies voor desinfectie

WAARSCHUWING:



Als u een cassette gaat desinfecteren, verwijdt u eerst de beeldplaat en zorgt u ervoor dat de cassette schoon is.

Indien nodig kunt u de buitenzijde van de cassettes reinigen, bij voorkeur alleen met een vochtige doek (water, zeep).



WAARSCHUWING:

Gebruik geen AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT-doekjes, AGFA CURIX-scherreiniger of andere schermreinigers of vloeistof met alcohol op het oppervlak van de cassette. De cassette kan hierdoor beschadigd raken.



WAARSCHUWING:

Giet of sproei nooit vloeistoffen rechtstreeks op het oppervlak van de cassette. Gebruik steeds een schone, pluisvrije doek, bevochtigd (niet druipend) met de oplossing.



WAARSCHUWING:

Gebruik in goed geventileerde ruimten.



WAARSCHUWING:

Desinfecterende oplossing/doekjes kunnen oog- en huidirritatie veroorzaken. Was uw handen met zeep en water

na gebruik. Raadpleeg vóór gebruik het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant en de aanbevelingen op het etiket voor aanvullende informatie.



WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat de cassette voor verzending goed is ontsmet en gedesinfecteerd.



Zorg ervoor dat alle oppervlakken goed droog zijn voor u de cassette weer gaat gebruiken.



Volg de gebruiksaanwijzingen bij het reinigingsproduct of het desinfecterende middel.

Goedgekeurde desinfecterende middelen

De volgende desinfecterende middelen zijn geschikt voor het materiaal van de cassette en kunnen worden gebruikt voor het desinfecteren van de buitenkant.

Desinfecterende middelen op basis van organisch zuur:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (doekjes of sproeifles)
(multiGREEN® is een handelsmerk van ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Desinfecterende middelen op basis van quaternair ammoniumzout:

- mikrozyd® sensitive doekjes
(mikrozyd is een handelsmerk van Schülke&Mayr GmbH)
- Sani-Cloth® Active wegwerpdoekjes
(Sani-Cloth is een handelsmerk van PDI®)



OPGELET:

Bij veelvuldig gebruik van een desinfecterend middel op basis van quaternair ammoniumzout kunnen cassetteonderdelen stuk gaan. Vermijd daarom veelvuldig gebruik. Aangeraden wordt dit

middel minder dan 50 keer te gebruiken tijdens de levensduur van de cassette.

Gebruik van een beschermende plastic envelop

Als de cassette wordt gebruikt in een omgeving waar desinfectie nodig is of waar deze in contact kan komen met bloed of ander lichaamsvocht, gebruikt u plastic enveloppen om de cassette te beschermen tegen rechtstreeks contact met de patiënt. Zorg ervoor dat de plastic envelop niet gekreukt is om plooien te voorkomen die zichtbaar zouden zijn op het beeld.

Disclaimer

De gebruiker is verantwoordelijk voor het selecteren en beschrijven van de juiste procedure en beleidsregels voor desinfectie.