



# Dezinfectarea casetelor

Pentru a dezinfecta casetele, folosiți exclusiv dezinfectantele aprobate de Agfa (vezi lista dezinfectantelor aprobate). Dacă doriți să folosiți alte dezinfectante, aveți nevoie de aprobarea Agfa, pentru că majoritatea dezinfectantelor pot deteriora caseta. Este interzisă și dezinfectarea cu UV.

Pentru informații amănunțite cu privire la procesul de dezinfectare, consultați instrucțiunile aferente dezinfectantului.

## Instrucțiuni de siguranță privind dezinfectarea

---

### **AVERTISMENT:**

**Înainte de a dezinfecta caseta, scoateți placa de imagini și verificați dacă este curată caseta.**



**Atunci când este necesar, puteți curăța exteriorul casetelor, de preferință numai cu o lavetă umedă (apă, săpun).**



### **AVERTISMENT:**

**Nu utilizați pe suprafața casetei AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, șervețele PROSAT, soluție de curățare a ecranului AGFA CURIX sau alte produse de curățare a ecranului ori soluții pe bază de alcool, pentru că acestea pot deteriora caseta.**



### **AVERTISMENT:**

**Nu turnați și nu pulverizați lichide direct pe suprafața casetei; folosiți o lavetă care nu lasă scame umezită (nu îmbibată) cu soluția de curățare.**



### **AVERTISMENT:**

**Utilizați în zone bine aerisite.**

**AVERTISMENT:**

**Soluțiile/șervețelele dezinfectante pot cauza iritații oculare și cutanate. După utilizare, spălați-vă mâinile cu apă și săpun. Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică de securitate a producătorului și recomandările de pe etichetă înainte de a utiliza produsul.**

**AVERTISMENT:**

**Înainte de expediere, verificați dacă decontaminarea și dezinfectarea casetei au fost efectuate în mod corect.**



Înainte de a reutiliza caseta, verificați dacă toate suprafețele acesteia s-au uscat complet.



Respectați instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsul de curățare/dezinfectare.

## Dezinfectante aprobate

---

În urma testelor efectuate, s-a stabilit că dezinfectantele de mai jos sunt compatibile cu materialul casetelor și că pot fi utilizate pe suprafața exterioară a casetei.

### Dezinfectant pe bază de acid organic:

- dezinfectant pentru suprafețe de uz medical multiGREEN® (șervețele sau spray)  
[multiGREEN® este marcă înregistrată a ulti med Products (Deutschland) GmbH]

### Dezinfectant pe bază de sare de amoniu cuaternar:

- șervețele pentru suprafețe sensibile mikrozid®  
(mikrozid este marcă înregistrată a Schülke&Mayr GmbH)
- șervețele de unică folosință cu substanță activă Sani-Cloth®  
(Sani-Cloth este marcă înregistrată a PDI®)

**ATENȚIE!**

Utilizarea frecventă a dezinfectantului pe bază de sare de amoniu cuaternar poate duce la fisurarea părților casetei. Prin urmare, evitați utilizarea frecventă; se recomandă să limitați utilizarea la < 50 de ori pe întreaga durată de viață a casetei.

## **Utilizarea foliei de protecție din plastic**

---

Dacă folosiți caseta într-un mediu în care se impune dezinfectarea acesteia sau dacă există posibilitatea contaminării cu sânge sau cu alte lichide corporale, utilizați foliile din plastic pentru a proteja caseta de contactul direct cu pacientul. Aveți grijă ca folia să nu fie șifonată, pentru a evita apariția cutelor pe imagine.

## **Exonerare de răspundere**

---

Alegerea și descrierea procedurii și a politicii corespunzătoare privind dezinfectarea îi revin utilizatorului.