



# Dezinfekce kazet

K dezinfekci kazet používejte pouze dezinfekční přípravky schválené společností Agfa (viz seznam schválených dezinfekčních prostředků). Plánujete-li používat jiné dezinfekční přípravky, vyžádejte si nejprve souhlas společnosti Agfa, neboť většina těchto prostředků může kazety poškodit. Dezinfekce UV zářením je taktéž nepřipustná.

Podrobné informace k nanášení dezinfekce naleznete v pokynech, které jsou dodávány společně s dezinfekčními přípravky.

## Bezpečnostní pokyny pro dezinfekci

---

### **VAROVÁNÍ:**



**Než začnete s dezinfekcí kazety, vyjměte nejprve paměťovou fólii a zajistěte, aby kazeta byla čistá.**

**V případě potřeby můžete vyčistit vnější stranu kazet, pokud možno pouze vlhkým hadříkem (voda, mýdlo).**



### **VAROVÁNÍ:**

**K čištění povrchu kazety nepoužívejte čistič na fosforové fólie AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, utěrky PROSAT, čistič obrazovky AGFA CURIX nebo jakékoli jiné čisticí přípravky na obrazovky nebo tekutiny obsahující alkohol, neboť takové přípravky by mohly kazetu poškodit.**



### **VAROVÁNÍ:**

**Nikdy nelijte a nestříkejte kapaliny přímo na kazetu, vždy použijte čistý hadřík nepouštějící chloupky navlhčený roztokem (nikoliv mokrá).**



### **VAROVÁNÍ:**

**Používejte v dobře větraných oblastech.**



### **VAROVÁNÍ:**

**Dezinfekční roztok / utěrky mohou způsobovat podráždění očí a kůže. Po použití si vždy umyjte ruce vodou a mýdlem. Před použitím nahlédněte do Bezpečnostního listu materiálu (MSDS) výrobce a prostudujte si doporučení na štítku výrobku, kde naleznete další informace.**



### **VAROVÁNÍ:**

**V případě odesílání se nejprve ujistěte, že je kazeta řádně dekontaminována a dezinfikována.**



Než začnete kazety znovu používat, ujistěte se, že je povrch kazety zcela suchý.



Postupujte podle pokynů k použití uvedených na čistícím/dezinfekčním prostředku.

## **Schválené dezinfekční přípravky**

---

Následující dezinfekční přípravky jsou slučitelné s materiály kazet a lze používat na jejich vnější povrch:

### **Dezinfekční prostředek na bázi kyseliny:**

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (čistící ubrousky nebo sprej) (multiGREEN® je obchodní značkou společnosti ulti med Products (Deutschland) GmbH)

### **Dezinfekční prostředek na bázi kvartérní amonné soli:**

- Utěrky mikrozid® sensitive (mikrozid je ochranná známka společnosti Schülke&Mayr GmbH)
- Jednorázové utěrky Sani-Cloth® Active (Sani-Cloth je ochranná známka společnosti PDI®)

**UPOZORNĚNÍ:**

Časté používání takovýchto dezinfekčních prostředků může mít za následek poškození částí kazet. Proto se mu vyhýbejte. Doporučuje se použití omezit na < 50krát během životnosti kazety.

## **Použití ochranného plastového obalu**

---

Jestliže je kazeta používána v prostředí vyžadujícím dezinfekci nebo kde může přijít do styku s krví či jinými tělesnými tekutinami, použijte plastové obaly chránící kazetu před přímým kontaktem s pacientem. Ujistěte se, že plastový obal není zmačkaný, aby nedošlo ke zobrazení takovýchto přehybů na snímku.

## **Odmítnutí odpovědnosti**

---

Za výběr a popis náležitého dezinfekčního postupu a stanovení politiky odpovídá uživatel.