



Desinficering af kassetterne

Brug kun desinficeringsmidler, der er godkendt af Agfa, til at desinficere kassetterne (se listen over godkendte desinficeringsmidler). Hvis man regner med at bruge andre desinficeringsmidler, skal de godkendes af Agfa før brug, da de fleste desinficeringsmidler kan beskadige kassetten. UV-desinficering er heller ikke tilladt.

For detaljerede oplysninger om desinficering se de brugsanvisninger, der leveres sammen med desinficeringsmidlet.

Sikkerhedsanvisninger for desinficering



ADVARSEL:

Fjern billedpladen og kontrollér, at kassetten er ren, inden kassetten desinficeres.

Om nødvendigt kan man rense kassetternes udvendige side, fortrinsvis kun med en fugtig klud (vand, sæbe).



ADVARSEL:

Brug ikke AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT-vådservietter, AGFA CURIX Screen Cleaner eller andre skærmrensningsmidler eller væsker, der indeholder alkohol, på kassetts overflade, da dette kan forårsage beskadigelse af kassetten.



ADVARSEL:

Hell aldrig eller sprøjt væsker direkte på kassetts overflade, brug altid en ren, fnugfri klud fugtet (ikke dryppende) med opløsningen.



ADVARSEL:

Anvendes i velventilerede områder.



ADVARSEL:

Desinficeringsopløsning/vådservietter kan forårsage irritation af øjnene og huden. Vask hænderne med sæbe og

vand efter brug. Konsulter producenternes sikkerhedsdatablade (MSDS) og anbefalingerne på produktetiketten for yderligere oplysninger før brug.



ADVARSEL:

Kontrollér, at kassetten er dekontamineret og desinficeret korrekt før levering.



Kontrollér, at alle overflader er helt tørre, inden kassetten bruges igen.



Følg brugsanvisningen som følger med rengørings-/desinfektionsmidlet.

Godkendte desinficeringsmidler

Følgende desinficeringsmidler er kompatible med kassettematerialet og kan bruges på kassetts udvendige overflade.

Desinfektionsmiddel baseret på organiske syrer:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (klude eller spray)
(multiGREEN® er et varemærke tilhørende ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Desinfektionsmiddel baseret på kvartært ammoniumsalt:

- mikrozid® følsomme vådservietter
(mikrozid er et varemærke tilhørende Schülke&Mayr GmbH)
- Sani-Cloth® Active engangs-vådservietter
(Sani-Cloth er et varemærke tilhørende PDI®)



FORSIGTIG:

Hyppig brug af det kvaternære ammoniumsaltbaserede desinfektionsmiddel kan resultere i brud på kassettedeile. Undgå

derfor hyppig brug. Det anbefales, at begrænse brugen til < 50 gange i kassetens levetid.

Brug af beskyttende plastomslag

Hvis kassetten bruges i et miljø, hvor desinficering er nødvendig eller hvor den kan komme i kontakt med blod eller andre kropsvæsker, skal der bruges plastomslag til at beskytte kassetten mod direkte kontakt med patienten. Kontrollér, at plastomslaget ikke er krøllet, for at undgå, at folderne vises på billedet.

Ansvarsfraskrivelse

Valg og beskrivelse af den passende desinficeringsprocedure og -politik er brugerens ansvar.