



카세트 소독하기

카세트를 소독하려면, Agfa에서 승인한 소독제만 사용하십시오(승인된 소독제 목록 참조). 대부분의 소독제는 카세트를 손상시킬 수 있으므로, 다른 소독제를 사용하려면 사용 전에 Agfa의 승인이 필요합니다. 자외선 소독도 허용되지 않습니다.

소독하는 방법에 대한 자세한 내용은 소독제와 함께 제공된 사용 지침을 참조하십시오.

소독 시 안전 지침

경고:



카세트를 소독하기 전에, 이미지 감광판을 제거하고 카세트가 깨끗한지 확인하십시오.

필요하면, 카세트의 외부도 가급적이면 젖은 천(물, 비누)을 사용하여 청소할 수 있습니다.



경고:

카세트 면에 **AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT** 와이프(wipe), **AGFA CURIX** 스크린 클리너 또는 기타 스크린 클리너나 알코올이 함유된 액체를 사용하지 마십시오. 카세트가 손상될 수 있습니다.



경고:

절대로 카세트 표면에 용액을 직접 붓거나 뿌리지 말고, 항상

보푸라기가 적은 천에 용액이 흘러 떨어지지 않을 정도로 적셔
사용하십시오.



경고:

환기가 잘 되는 곳에서 사용하십시오.



경고:

소독 용액/와이프(wipe)는 눈과 피부 자극을 유발할 수
있습니다. 사용 후에는 비누와 물로 손을 씻으십시오. 사용 전에
추가 정보가 필요하면, 제조업체의 물질 안전 보건
자료(MSDS)와 제품 라벨에 표시된 권장 사항을 참조하십시오.



경고:

선적 전에 카세트의 오염 물질이 제대로 제거되었고
소독되었는지 확인하십시오.



카세트를 다시 사용하기 전에 모든 표면이 완전히 건조되었는지
확인하십시오.



세척 제품이나 소독 제품과 함께 제공된 사용 지침을
따르십시오.

승인된 소독제

다음 소독제들은 카세트 재질과 호환성이 있는 것으로 확인되었으며 카세트
외부 표면에 사용할 수 있습니다.

유기산계 소독제:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED(물티슈 또는 스프레이)
(multiGREEN®은 ulti med Products(독일) GmbH의 상표입니다.)

4급 암모늄염계 소독제:

- mikrozid® 민감성용 물티슈
(mikrozid는 Schülke&Mayr GmbH의 상표입니다.)
- Sani-Cloth® Active 일회용 물티슈
(Sani-Cloth는 PDI®의 상표입니다.)



주의:

4급 암모늄염계 소독제를 자주 사용하면 카세트 부품이 파손될 수 있습니다. 따라서 자주 사용하지 말고, 카세트 수명이 다할 때까지 50회 미만으로 사용할 것을 권장합니다.

보호 플라스틱 봉투 사용

소독이 필요하거나 혈액이나 기타 체액에 접촉할 수 있는 환경에서 카세트를 사용할 경우에는 플라스틱 봉투를 사용하여 카세트가 환자에게 직접 접촉하지 않도록 보호하십시오. 이미지에 주름 자국이 표시되지 않도록 플라스틱 봉투가 구겨지지 않게 하십시오.

책임 거부 조항

적절한 소독 절차 및 정책의 선택 및 설명은 사용자의 책임입니다.