



Kassettide desinfitseerimine

Kasutage kassettide desinfitseerimiseks ainult Agfa poolt heaks kiidetud desinfektsioonivahendeid (vt heaks kiidetud desinfektsioonivahendite loendit). Kui soovite kasutada muid desinfektsioonivahendeid, peab Agfa need enne kasutamist heaks kiitma, sest enamik desinfektsioonivahendeid võivad kassetti kahjustada. Samuti ei ole lubatud desinfitseerimine ultraviolettkiirgusega.

Üksikasjalikku teavet desinfitseerimise kohta lugege desinfektsioonivahendi kasutusjuhendist.

Desinfitseerimise ohutusjuhised

HOIATUS!



Enne kasseti desinfitseerimist eemaldage kujutiseplaat ja veenduge, et kassett on puhas.

Vajaduse korral võite puhastada kassetti väljastpoolt, eelistatavalt üksnes niiske (vee, seebiga) lapiga.



HOIATUS!

Ärge kasutage toodet GFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT pühkelappe, ekraanipuhastusvahendit Curix Screen Cleaner ega ühtegi teist ekraanipuhastusvahendit või alkoholi sisaldavat vedelikku kasseti pinnal, sest see võib kassetti kahjustada.



HOIATUS!

Ärge kunagi valage ega pihustage vedelikke otse kasseti pinnale; kasutage alati puhast, ebemevaba lappi, mida on niisutatud (mitte tilkuvalt) lahusega.



HOIATUS!

Kasutada hästi ventileeritud alas.



HOIATUS!

Desinfektsioonivahendid/lapid võivad põhjustada silmade ja naha ärritust. Kasutamise järel peske käsi seebi ja veega. Lisateabe saamiseks lugege enne kasutamist materjali ohutuskaarte ("Material Safety Data Sheets", MSDS) ja toote etiketil toodud soovitusi.



HOIATUS!

Veenduge, et kassett on enne saatmist korralikult dekontamineeritud ja desinfitseeritud.



Enne kasseti uuesti kasutamist veenduge, et kõik pinnad on täiesti kuivad.



Järgige puhastus-/desinfektsioonivahendiga kaasnenud juhiseid.

Heakskiidetud desinfektsioonivahendid

Leiti, et järgmised desinfektsioonivahendid sobivad kasseti materjaliga kokku ja neid võib kasutada kasseti välispinna desinfitseerimiseks.

Orgaaniline happeline desinfektsioonivahend:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (pühkelapid või pihusti)
(multiGREEN® on ettevõttele ulti med Products (Deutschland) GmbH kuuluv registreeritud kaubamärk)

Kvaternaarsel ammooniumsoolal põhinev desinfektsioonivahend:

- mikrozyd® tundlikud pühkelapid
(mikrozyd on ettevõttele Schülke&Mayr GmbH kuuluv registreeritud kaubamärk)
- Sani-Cloth® Active ühekordselt kasutatavad pühkelapid
(Sani-Cloth on PDI®-i kaubamärk)



ETTEVAATUST!

Kvaternaarsel ammooniumsoolal baseeruva desinfektsioonivahendi sagedane kasutamine võib põhjustada kassetti osade purunemist. Seetõttu vältige selle sagedast kasutamist, soovitatav on piirata selle kasutamist < 50 korrale kasseti tööea jooksul.

Kaitsva plastümbrise kasutamine

Kui kassetti kasutatakse keskkonnas, kus on vajalik desinfitseerimine või kus see võib kokku puutuda vere või muude kehavedelikega, kasutage plastümbriseid kasseti kaitsmiseks patsiendiga otsese kokkupuutumise eest. Kujutistele jäävate voltide vältimiseks veenduge, et plastümbris ei ole kortsus.

Lahtiütlus

Sobiva desinfitseerimismeetodi ja protseduuri valimine ning kirjeldamine on kasutaja vastutusel.