



Kasettien desinfiointi

Käytä kasettien desinfiointiin ainoastaan Agfan hyväksymiä desinfiointiaineita (katso hyväksytyjen desinfiointiaineiden luettelo). Jos haluat käyttää muita desinfiointiaineita, hyväksytä ne Agfalla ennen käyttöä, sillä useimmat desinfiointiaineet voivat vahingoittaa kasettia. UV-desinfiointi ei ole sallittua.

Katso desinfiointiaineen käyttöä koskevat lisätiedot sen mukana toimitetuista ohjeista.

Desinfiointia koskevat turvallisuusohjeet

VAROITUS:



Poista kuvalevy ennen kasetin desinfiointia ja varmista, että kasetti on puhdas.

Kasettien ulkopinnat voidaan puhdistaa tarvittaessa mieluiten ainoastaan nihkeällä liinalla (vesi, saippua).



VAROITUS:

Älä käytä kasetin pintojen puhdistamiseen AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta, PROSAT-pyyhkeitä, AGFA CURIX -puhdistusainetta tai mitään muita näytön puhdistusaineita tai alkoholipitoista nesteitä, sillä ne voivat vahingoittaa kasettia.



VAROITUS:

Älä koskaan kaada tai suihkuta nesteitä suoraan kasetin pinnalle. Käytä aina puhdasta, vähän nukkaavaa liinaa, joka on kostutettu puhdistus- tai desinfiointiliuokseen (liinasta ei saa valua nestettä).



VAROITUS:

Käytä hyvin tuuletetussa tilassa.



VAROITUS:

Desinfiointiliuokset/-pyyhkeet saattavat aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä. Pese kätesi saippualla ja vedellä

desinfiointituotteiden käytön jälkeen. Tutustu ennen desinfiointituotteiden käyttöä valmistajan käyttöturvallisuustiedotteeseen (MSDS) ja tuotteen etiketissä annettuihin suosituksiin.



VAROITUS:

Varmista, että kasetti puhdistetaan ja desinfioidaan asianmukaisesti ennen kuljettamista tai lähettämistä.



Varmista, että kaikki pinnat ovat täysin kuivia, ennen kuin kasetti otetaan uudelleen käyttöön.



Noudata puhdistus-/desinfiointituotteen mukana toimitettuja ohjeita.

Hyväksytyt desinfiointiaineet

Seuraavien desinfiointiaineiden on todettu olevan yhteensopivia kasetin materiaalien kanssa, ja niitä voidaan käyttää kasetin ulkopintojen desinfiointiin.

Orgaanisia happoja sisältävät desinfiointiaineet:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (pyyhkeet tai spray)
(multiGREEN® on ulti med Products (Deutschland) GmbH -yhtiön tavaramerkki)

Kvaternaarisia ammoniumsuoloja sisältävät desinfiointiaineet:

- mikrozid® sensitive -pyyhkeet
(mikrozid on Schülke&Mayr GmbH -yhtiön tavaramerkki)
- Sani-Cloth® Active -kertakäyttöpyyhkeet
(Sani-Cloth on PDI®-yhtiön tavaramerkki)



HUOMAUTUS:

Kvaternaarisia ammoniumsuoloja sisältävien desinfiointiaineiden toistuva käyttö voi vahingoittaa kasetin osia. Suosittelemme siksi,

että tällaisia desinfiointiaineita käytetään enintään 50 kertaa kasetin käyttöiän aikana.

Muovisen suojakuoren käyttö

Jos kasettia käytetään ympäristössä, jossa vaaditaan desinfiointia tai jossa se saattaa joutua kosketuksiin veren tai muiden ruumiinnesteiden kanssa, estä kasetin joutuminen suoraan kosketukseen potilaan kanssa muovisia suojakuoria käyttämällä. Varmista, että suojakuoreissa ei ole ryppyjä tai taitoksia, sillä ne näkyvät kuvassa.

Vastuuvapauslauseke

Asianmukaisten desinfiointimenetelmien ja -käytäntöjen valitseminen ja kuvaaminen ovat käyttäjän vastuulla.