



Kasešu dezinfekcija

Lai dezinficētu kasetes, izmantojiet tikai Agfa apstiprinātus dezinfekcijas līdzekļus (skatiet apstiprināto dezinfekcijas līdzekļu sarakstu). Ja plānojat izmantot citus dezinfekcijas līdzekļus, pirms lietošanas ir jāsaņem apstiprinājums no uzņēmuma Agfa, jo lielākā daļa dezinfekcijas līdzekļu var sabojāt kaseti. Arī dezinfekcija ar UV starojumu nav pieļaujama.

Sīkāku informāciju par dezinfekciju skatiet lietošanas instrukcijās, kas tiek piegādātas kopā ar dezinfekcijas līdzekli.

Drošības norādījumi par dezinfekciju



BRĪDINĀJUMS:

Pirms kasetes dezinfekcijas izņemiet attēla plati un pārļiecinieties, vai kasete ir tīra.

Kad nepieciešams, jūs varat notīrīt kasešu ārpusi, vēlams ar mitru drānu (ūdeni, ziepēm).



BRĪDINĀJUMS:

Netīriet kasetes virsmu ar AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT salvetēm, AGFA CURIX ekrāna tīrītāju vai kādu citu ekrāna tīrītāju, vai spirtu saturošu šķidrumu, jo tādējādi kaseti var sabojāt.



BRĪDINĀJUMS:

Nekad neļejiet un nesmidziniet šķidrumus tieši uz kasetes virsmas; vienmēr lietojiet drānu bez plūksnām, kas samitrināta (nevis piloša) šķīdumā.



BRĪDINĀJUMS:

Lietojiet labi vēdinātās zonās.



BRĪDINĀJUMS:

Dezinfekcijas šķīdums/salvetes var izraisīt acu un ādas kairinājumu. Pēc lietošanas mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Pirms lietošanas skatiet papildinformāciju

ražotāja materiālu drošības datu lapās (MSDS) un ieteikumus uz produkta marķējuma.



BRĪDINĀJUMS:

Pirms pārvadāšanas pārliedzinieties, vai kasete ir pienācīgi attīrīta un dezinficēta.



Pirms kasešu lietošanas visām virsmām jābūt pilnīgi sausām.



Ievērojiet lietošanas norādījumus, kas sniegti kopā ar tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekli.

Apstiprināti dezinfekcijas līdzekļi

Uzskaitītie dezinfekcijas līdzekļi ir atzīti par saderīgiem ar kasetes materiālu un tos var izmantot uz kasetes ārējās virsmas.

No organiskās skābes pagatavots dezinfekcijas līdzeklis:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (salvetes vai aerosols) (multiGREEN® ir uzņēmuma "ulti med Products (Deutschland) GmbH" preču zīme)

No četrreizvietotajiem amonija sāļiem pagatavots dezinfekcijas līdzeklis:

- mikrocid® sensitive wipes (mikrocid ir uzņēmuma "Schülke&Mayr GmbH" preču zīme)
- Sani-Cloth® aktīvās vienreizējas lietošanas salvetes (Sani-Cloth ir PDI® preču zīme)



Uzmanību!

Bieža no četrreizvietotajiem amonija sāļiem pagatavota dezinfekcijas līdzekļa lietošana var izraisīt kasetes detaļu

salūšanu. Tāpēc, lai izvairītos no biežas lietošanas, kasetes to kalpošanas laikā ieteicams lietot < 50 reizes.

Plastmasas aizsargapvalka izmantošana

Ja kaseti lieto apstākļos, kur nepieciešama dezinfekcija vai, kur tā var saskarties ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem, izmantojiet plastmasas apvalkus, lai pasargātu kaseti no tiešas saskares ar pacientu. Plastmasas apvalks nedrīkst būt sakrokojies, lai krokas neparādītos uz attēla.

Atruna

Lietotājijs atbild par atbilstošas dezinfekcijas procedūras un pasākumu izvēli.