



Razkuževanje kaset

Za razkuževanje kaset uporabljajte le razkužila, ki jih je odobrila Agfa (glejte seznam odobrenih razkužil). Če nameravate uporabljati druga razkužila, potrebujete pred uporabo privoljenje podjetja Agfa, saj lahko večina razkužil kaseto poškoduje. Prav tako ni dovoljeno razkuževanje z UV-žarčenjem.

Za podrobne informacije o tem, kako uporabljati razkužila, glejte navodila za uporabo, ki so priložena razkužilu.

Varnostne smernice za razkuževanje



OPOZORILO:

Pred razkuževanjem kasete odstranite ploščo s sliko in se prepričajte, ali je kasetna čista.

Ko je to potrebno, lahko očistite zunanost kaset, po možnosti le z mokro krpo (vodo, milnico).



OPOZORILO:

Na površini kasete ne uporabljajte čistila ta fosforne plošče AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, robčkov PROSAT, čistila za zaslone AGFA CURIX ali drugih tekočin z alkoholom, saj jo lahko tako poškodujete.



OPOZORILO:

Na površino kasete tekočin nikoli ne polivajte ali razpršite neposredno in vedno uporabljajte čisto krpo, ki ne pušča kosmov, navlaženo (ne prepojeno) z raztopino.



OPOZORILO:

Uporabljati le v dobro prezračevanem prostoru.



OPOZORILO:

Razkužilna raztopina/robčki lahko dražijo oči in kožo. Po uporabi si umijte roke z milom in vodo. Za dodatne

informacije pred uporabo preberite Varnostni list (MSDS) proizvajalca in priporočila na oznaki izdelka.



OPOZORILO:

Pred pošiljanjem se prepričajte, da je kaseto ustrezno dekontaminirana in razkužena.



Prepričajte se, da so vse površine popolnoma suhe, preden kaseto znova uporabite.



Upoštevajte navodila, priložena čistilnemu sredstvu/razkužilu.

Odobrena razkužila

Naslednja razkužila so dokazano združljiva z materialom kaset in se smejo uporabljati na zunanji površini kasete.

Razkužilo na osnovi organske kisline:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (robčki ali pršilo) (multiGREEN® je blagovna znamka družbe uliti med Products (Deutschland) GmbH)

Razkužilo na osnovi kvartarne amonijeve soli:

- Nežni robčki mikrocid® (mikrocid je blagovna znamka družbe Schülke&Mayr GmbH)
- Robčki za enkratno uporabo Sani-Cloth® Active (Sani-Cloth je blagovna znamka družbe PDI®)



PREVIDNOST:

Pogosta uporaba razkužila na osnovi kvartarne amonijeve soli lahko povzroči lomljenje delov kasete. Zato se pogosti uporabi izogibajte – priporočamo, da uporabo omejite na < 50-krat v dobi uporabnosti kasete.

Uporaba zaščitnega plastičnega ovitka

Če se kaseta uporablja v okolju, kjer je nujna uporaba razkužil ali kjer lahko pride v stik s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, za zaščito pred neposrednim stikom z bolnikom uporabite zaščitni plastični ovitek. Prepričajte se, da plastični ovitek ni naguban, sicer se bodo na sliki poznale črte.

Posebno opozorilo

Uporabnik je odgovoren za izbiro in opis ustreznega postopka in smernic za razkuževanje.