



Дезинфекция кассет

Чтобы выполнить дезинфекцию кассет, используйте только те дезинфицирующие средства, которые утверждены Agfa (см. список утвержденных дезинфицирующих средств). Перед использованием иных дезинфицирующих средств обратитесь в компанию Agfa с запросом о разрешении их применения, поскольку воздействие большинства дезинфицирующих средств приводит к повреждению кассеты. Дезинфекция УФ-излучением также не допускается.

Дополнительная информация в отношении применения дезинфицирующих средств приведена в инструкции по использованию, прилагаемой к соответствующему дезинфицирующему средству.

Указания по технике безопасности в отношении дезинфекции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед тем, как приступить к дезинфицированию кассеты, извлеките сигнальную пластину и убедитесь в чистоте кассеты.



В случае необходимости допускается чистка внешней поверхности кассет лоскутом влажной ткани (смоченном в воде или мыльном растворе).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не обрабатывайте кассеты чистящим средством AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, салфетками PROSAT, средством для чистки экранов AGFA CURIX или иными средствами для чистки экранов, содержащими спирт, так как их воздействие может привести к повреждению кассеты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не наливайте или не распыляйте жидкость непосредственно на поверхности кассеты;

пользуйтесь чистой тканью низкой ворсистости, слегка смоченной (не оставляющей капель жидкости) в растворе.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Использовать в хорошо проветриваемых местах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Воздействие дезинфицирующего раствора/вещества на салфетках может вызвать раздражение глаз и кожи. После использования дезинфицирующего вещества или салфеток вымойте руки с мылом.

Перед использованием ознакомьтесь с дополнительной информацией, которая приведена в паспорте безопасности материалов (MSDS), предоставляемом производителем, а также с рекомендациями на ярлыке изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед отправкой убедитесь в том, что кассета надлежащим образом обеззаражена и полностью дезинфицирована.



Перед повторным использованием кассеты убедитесь в абсолютной сухости всех ее поверхностей.



Обязательно следуйте инструкциям по использованию, прилагаемым к средству для чистки/дезинфекции.

Допущенные дезинфицирующие средства

Установлена совместимость перечисленных ниже дезинфицирующих средств с материалом кассет и подтверждена возможность их использования для обработки внешних поверхностей кассет.

Дезинфицирующие средства на основе органических кислот:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (салфетки или аэрозоль)
(multiGREEN® является товарным знаком ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Дезинфицирующие средства на основе четвертичных солей аммония:

- салфетки mikroqid® для чувствительной кожи
(mikroqid является товарным знаком Schülke&Mayr GmbH)
- одноразовые салфетки Sani-Cloth® Active
(Sani-Cloth является товарным знаком PDI®)



ВНИМАНИЕ:

Частое использование дезинфицирующих средств на основе четвертичных солей аммония может привести к поломке частей кассеты. Поэтому избегайте их частого использования: рекомендуется ограничить количество сеансов применения, чтобы в течение всего срока службы кассеты оно не превышало 50.

Использование защитного пластикового конверта

Если кассета используется в условиях, в которых предусматривается ее обязательная дезинфекция, или же в которых вероятен контакт кассеты с кровью или прочими жидкостями организма пациента, используйте пластиковые конверты, чтобы предупредить непосредственный контакт кассеты с пациентом. Во избежание отображения складок на изображении, убедитесь в том, что конверт не смят.

Ограничение ответственности

Ответственность за выбор и определение параметров соответствующей процедуры дезинфекции несет пользователь.