



Desinficering av kassetterna

För desinficering av kassetterna, använd endast desinfektionsmedel som är godkända av Agfa (se listan över godkända desinfektionsmedel). Om du planerar att använda andra desinfektionsmedel krävs godkännande från Agfa före användningen, eftersom de flesta andra desinfektionsmedel kan skada kassetten. UV-desinficering är inte heller tillåten.

Mer information om desinficeringsproceduren finns i bruksanvisningen som levereras med desinfektionsmedlet.

Säkerhetsföreskrifter för desinficering

WARNING:



Innan kassetten desinficeras, ta ut bildplattan och kontrollera att kassetten är ren.

Vid behov kan du rengöra utsidan av kassetterna, helst bara med en fuktad duk (tvål och vatten).



WARNING:

Använd inte AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT-trasor, AGFA CURIX skärmrengöring eller andra skärmrengöringsmedel eller alkoholhaltig vätska på kassetterns yta eftersom det kan skada kassetten.



WARNING:

Häll eller spray aldrig vätska direkt på kassetterns yta och använd alltid en ren duk med lågt fibersläpp, fuktad (inte genomvåt) med lösningen.



WARNING:

Använd i områden med god ventilation.



WARNING:

Desinfektionslösning/-dukar kan orsaka ögon- och hudirritation. Tvätta händerna med tvål och vatten efter användningen. Läs tillverkarens säkerhetsdatablad (MSDS)

och rekommendationer på produktetiketten för ytterligare information innan produkten används.



VARNING:

Kontrollera att kassetten har dekontaminerats och desinficerats på rätt sätt före transport.



Kontrollera att alla ytor är ordentligt torra innan kassetten börjar användas igen.



Följ bruksanvisningen som medföljer rengörings-/desinfektionsprodukten.

Godkända desinfektionsmedel

Följande desinfektionsmedel har funnits vara kompatibla med kassetts material och kan användas till ytorna på kassetts utsida.

Desinfektionsmedel baserat på organiska syror:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (våtservetter eller spray) (multiGREEN® är ett varumärke som tillhör uli med Products (Deutschland) GmbH)

Desinfektionsmedel baserat på kvartärt ammoniumsalt:

- mikroqid® rengöringsdukar för känsliga material (mikroqid är ett varumärke som tillhör Schülke&Mayr GmbH)
- Sani-Cloth® Active engångsdukar (Sani-Cloth är ett varumärke som tillhör PDI®)



VIKTIGT:

Frekvent användning av desinfektionsmedlet baserat på kvartärt ammoniumsalt kan leda till att kassettdelar går sönder. Undvik därför frekvent användning, vi rekommenderar att användningen begränsas till < 50 gånger under kassetts livstid.

Användning av skyddsplast

Om kassetten används i en miljö där desinficering är nödvändig eller där den kan komma i kontakt med blod eller andra kroppsvätskor, använd plastöverdrag för att skydda kassetten från direkt kontakt med patienter. Kontrollera att plastöverdraget inte är skrynkligt för att undvika att vecken blir synliga i bilden.

Ansvarsfriskrivning

Ansvaret för val och beskrivning av lämpliga desinficeringsrutiner och lämplig desinficeringspolicy ligger hos användaren.