



Απολύμανση των κασετών

Για την απολύμανση των κασετών, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα απολυμαντικά από την Agfa (βλ. κατάλογο εγκεκριμένων απολυμαντικών). Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άλλα απολυμαντικά, πριν από τη χρήση απαιτείται η έγκριση της Agfa, καθότι τα περισσότερα απολυμαντικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην κασέτα. Η απολύμανση με υπεριώδεις ακτίνες επίσης δεν επιτρέπεται.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της απολύμανσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παραλάβατε με το απολυμαντικό.

Οδηγίες ασφαλείας για την απολύμανση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν από την απολύμανση της κασέτας, αφαιρέστε την ακτινογραφική πλάκα και βεβαιωθείτε ότι η κασέτα είναι καθαρή.



Όταν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερικό των κασετών, κατά προτίμηση με ένα νωπό πανί (νερό, σαπούνι).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην χρησιμοποιείτε AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, μαντηλάκια PROSAT ή καθαριστικό οθόνης AGFA CURIX ή άλλα καθαριστικά οθόνης ή άλλο αλκοολούχο υγρό στην επιφάνεια της κασέτας, καθότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στην κασέτα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη ρίχνετε ποτέ υγρά απευθείας επάνω στην επιφάνεια της κασέτας και μην την ψεκάζετε. Να χρησιμοποιείτε πάντα ένα υγρό πανί (να μη στάζει) που δεν αφήνει χνούδι με το διάλυμα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Χρήση σε καλά αεριζόμενες περιοχές.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Το διάλυμα και τα πανάκια απολύμανσης ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα. Μετά τη χρήση, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Συμβουλευτείτε τα Δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) του κατασκευαστή και τις συστάσεις στην ετικέτα του προϊόντος για πρόσθετες πληροφορίες πριν από τη χρήση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα έχει υποβληθεί σε κατάλληλη απορρύπανση και απολύμανση πριν από την αποστολή.



Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι απόλυτα στεγνές πριν επανέλθουν οι κασέτες σε χρήση.



Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το προϊόν καθαρισμού/απολύμανσης.

Εγκεκριμένα απολυμαντικά

Τα ακόλουθα απολυμαντικά έχουν βρεθεί συμβατά με το υλικό των κασετών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξωτερική επιφάνεια της κασέτας.

Απολυμαντικό με βάση το οργανικό οξύ:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (μαντηλάκια ή σπρέι)
(Η ονομασία multiGREEN® είναι εμπορικό σήμα της ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Απολυμαντικό με βάση το άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου:

- απαλά μαντηλάκια mikrozid®
(Η ονομασία mikrozid είναι εμπορικό σήμα της Schülke&Mayr GmbH)
- Μαντηλάκια μίας χρήσης Sani-Cloth® Active
(Η ονομασία Sani-Cloth είναι εμπορικό σήμα της PDI®)



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συχνή χρήση του απολυμαντικού με βάση το άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο των μερών της κασέτας. Ως εκ τούτου, να αποφεύγετε τη συχνή χρήση. Συνιστάται να περιορίσετε τη χρήση σε < 50 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της κασέτας.

Χρήση προστατευτικού πλαστικού φακέλου

Εάν η κασέτα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον όπου απαιτείται απολύμανση, ή κάπου όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά, χρησιμοποιήστε πλαστικούς φακέλους για να προστατεύσετε την κασέτα από την άμεση επαφή με τον ασθενή. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σχηματιστεί πτυχώσεις στον πλαστικό φάκελο, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνισή τους στην εικόνα.

Αποποίηση ευθυνών

Η επιλογή και περιγραφή της κατάλληλης διαδικασίας και πολιτικής απολύμανσης αποτελεί ευθύνη του χρήστη.