



Kasetlerin Dezenfekte Edilmesi

Kasetleri dezenfekte etmek için sadece Agfa onaylı dezenfektanlar kullanın (bkz. Onaylı dezenfektanlar listesi). Başka dezenfektan kullanmayı planlıyorsanız, dezenfektanların çoğu kasete hasar verebildiğinden kullanmadan önce Agfa onayı gerekir. UV dezenfeksiyonu da yasaktır.

Dezenfektan uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi için dezenfektanla verilen kullanma talimatlarına bakın.

Dezenfeksiyon güvenlik talimatları

UYARI:



Kaseti dezenfekte etmeden önce görüntü plakasını çıkarın ve kasetin temiz olduğundan emin olun.

Gerekirse, kasetlerin dışını da temizleyebilirsiniz; tercihen sadece nemli bir bez (su, sabun) kullanın.

UYARI:



Kasete hasar verebileceğinden AGFA CR Fosfor Plakası Temizlik Maddesi, PROSAT temizlik mendilleri, AGFA CURIX ekran temizleyici veya sıvı içeren herhangi bir alkolü kaset yüzeyinde kullanmayın.

UYARI:



Doğrudan kasetin yüzeyine asla sıvı dökmeyin veya püskürtmeyin, daima temiz, solüsyonla ıslatılmış (damlamayan) az tüylenen bir bez kullanın.

UYARI:



İyi havalandırılmış alanlarda kullanın.

UYARI:



Dezenfeksiyon solüsyonu/bezleri göz ve ciltte tahrişe neden olabilir. Kullandıktan sonra su ve sabun ile ellerinizi yıkayın. Kullanmadan önce daha fazla bilgi için

retici firmanın Malzeme Gvenlik Bilgi Formlarına (MSDS) ve rn etiketi zerindeki tavsiyelere bařvurun.



UYARI:

Sevk ncesinde kasetin dzgn bir řekilde dekontamine ve dezenfekte edildiđinden emin olun.



Kaseti kullanmaya bařlamadan nce tm yzeylerin tamamen kuru olduđunu kontrol edin.



Temizleme/dezenfekte etme rn ile birlikte verilen kullanım talimatlarını izleyin.

Onaylı dezenfektanlar

Ařađıdaki dezenfektanların kaset materyali ile uyumlu oldukları tespit edilmiř olup kasetin dıř yzeyinde kullanılabilirler.

Organik asit bazlı dezenfektan:

- multiGREEN® Yzey Dezenfeksiyonu MED (mendiller veya sprey) (multiGREEN®, ulti med Products (Deutschland) GmbH'nin ticari markasıdır)

Drtl amonyum tuz bazlı dezenfektan:

- mikrozyd® hassas mendiller (mikrozid, Schlke&Mayr GmbH'nin ticari markasıdır)
- Sani-Cloth® Active tek kullanımlık mendiller (Sani-Cloth, PDI®'nin ticari markasıdır)



DİKKAT:

Drtl amonyum tuz bazlı dezenfektanın sık kullanılması, kaset paralarının kırılmasına neden olabilir. Bununla birlikte, sık kullanımdan kaçının, kasetin kullanım mr boyunca en fazla 50 kere kullanımla sınırlandırılması nerilir.

Koruyucu plastik zarf kullanımı

Kaset, dezenfeksiyon gerektiren bir ortamda ya da kan veya diğ er v cut sıvıları ile temas edebilecek bir yerde kullanılıyorsa kasetin doğrudan hastaya temas etmesini engellemek i in plastik zarflar kullanın. G r nt de kırıřıklıklar belirmesini engellemek i in plastik zarfı buruřturmamaya dikkat edin.

Yasal Uyarı

Uygun dezenfeksiyon prosed r  ve politikasının se ilmesi ve tarifi kullanıcı sorumluluğundadır.