



对暗盒进行消毒

对暗盒进行消毒时，只能使用 Agfa 认可的消毒剂（请参阅获认可的消毒剂列表）。如果您计划使用其它消毒剂，则需要在使用前获得 Agfa 的认可，因为大多数消毒剂可能会损坏暗盒。此外，也不允许进行紫外线消毒。

有关如何应用消毒剂的详细信息，请参阅随消毒剂一起提供的使用说明。

消毒安全指示



警告：

为暗盒消毒之前，请取出 IP 板并确保暗盒洁净。

如有必要，最好仅用湿布（水、肥皂）来清洁暗盒的外部表面。



警告：

请勿使用 AGFA CR Phospor Plate Cleaner、PROSAT 擦拭布、AGFA CURIX screen cleaner 或任何其它屏幕清洁剂或任何含有酒精的液体清洁暗盒表面，因为这可能会损坏暗盒。



警告：

切勿将液体直接泼洒或喷射在暗盒表面，请始终使用蘸有溶液的清洁低尘擦拭布（不滴水）。



警告：

在通风良好的区域内使用。



警告：

消毒液/擦拭布可能会刺激眼睛和皮肤。使用后，请用肥皂和水洗手。使用前请参阅制造商提供的《材料安全数据表》(MSDS) 和产品标签上的建议了解更多信息。



警告：

确保暗盒在装运前已经过正确的去污和消毒。



在恢复使用暗盒之前，请确保所有表面均已完全干燥。



务必遵守清洁 / 消毒产品随附的使用说明。

认可的消毒剂

下列消毒剂已被发现可与暗盒材料相容，因此可用于暗盒的外表面。

有机酸类消毒剂：

- multiGREEN® 医用表面消毒剂（擦拭巾或喷剂）

（multiGREEN® 为德国 uli med Products 公司的商标）

季铵盐型消毒剂：

- Mikroqid® 防过敏湿纸巾
（mikroqid 为德国舒美公司 (Schülke&Mayr GmbH) 的商标）
- Sani-Cloth® 活性一次性湿纸巾
（Sani-Cloth 为 PDI® 的商标）



注意：

频繁使用季铵盐型消毒剂会导致暗盒部件断裂。因此，请避免频繁使用该消毒剂；建议在暗盒的使用期限内，将该消毒剂的使用次数限制在 50 次以内。

塑料保护包的用途

如果在需要消毒或者可能接触到血液或其它体液的环境中使用暗盒，则请使用塑料包将暗盒包上，以防其与患者直接接触。请确保塑料包没有褶皱，以避免图像上显示折痕。

免责声明

用户负责选择和描述适合的消毒程序和政策。