



Dezynfekowanie kaset

Do dezynfekcji kaset wolno używać wyłącznie środków dezynfekujących zatwierdzonych przez Agfa (zob. listę zatwierdzonych środków dezynfekujących). Jeśli planowane jest zastosowanie innych środków dezynfekujących, przed użyciem konieczne jest dopuszczenie ich przez firmę Agfa, ponieważ większość z nich może uszkodzić kasety. Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym także nie jest dopuszczalna.

Szczegółowe informacje o stosowaniu dezynfekcji można znaleźć w instrukcji użytkowania dostarczonej ze środkiem dezynfekującym.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w dezynfekcji

OSTRZEŻENIE:

Przed dezynfekowaniem kasety należy usunąć płytę obrazową i upewnić się, że kaseeta jest czysta.



W razie konieczności można czyścić zewnętrzną stronę kaset, najlepiej wyłącznie zwilżoną ściereczką (woda, mydło).

OSTRZEŻENIE:

Na powierzchni kasety nie wolno używać środka AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, ściereczek PROSAT, środka czyszczącego AGFA CURIX ani żadnej cieczy z alkoholem, może to spowodować uszkodzenie kasety.



OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie nalewać ani nie rozpylać płynów bezpośrednio na powierzchnię kasety, zawsze należy używać czystej szmatki, bez włókien, zwilżonej w roztworze (nie ociekającej).



OSTRZEŻENIE:

Używać w dobrze wentylowanych miejscach.



**OSTRZEŻENIE:**

Roztwór i ściereczki dezynfekujące mogą powodować podrażnienia oczu i skóry. Po użyciu należy umyć ręce mydłem i wodą. Przed użyciem należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami na karcie charakterystyki substancji (MSDS) oraz z zaleceniami na etykiecie produktu.

**OSTRZEŻENIE:**

Przed wysyłką należy dokładnie sprawdzić, czy kaseeta jest odpowiednio oczyszczona i zdezynfekowana.



Przed ponownym użytkowaniem kaseety wszystkie jej powierzchnie muszą być dokładnie osuszone.



Przestrzegać instrukcji użytkowania środków czyszczących/dezynfekujących.

Dopuszczone środki dezynfekujące

Poniższe środki dezynfekujące uznano za zgodne z materiałem kaseety i są dopuszczone do stosowania na zewnętrznych powierzchniach kaset.

Środek dezynfekujący na bazie kwasów organicznych:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (ściereczki lub spray) (multiGREEN® jest znakiem towarowym firmy ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Środek dezynfekujący na bazie czwartorzędowej soli amonowej:

- delikatne ściereczki mikrozyd® (mikrozyd jest znakiem towarowym firmy Schülke&Mayr GmbH)
- Ściereczki jednorazowe Sani-Cloth® Active (Sani-Cloth jest znakiem towarowym firmy PDI®)

**PRZESTROGA:**

Częste używanie środków dezynfekujących na bazie czwartorzędowej soli amonowej może prowadzić do uszkodzenia części kasety. Dlatego należy unikać częstego używania takich ściereczek. Zaleca się ograniczyć używanie ściereczek do mniej niż 50 razy podczas okresu eksploatacji kasety.

Korzystanie z ochronnej koperty z tworzywa sztucznego

Jeśli kaseeta jest używana w środowisku wymagającym dezynfekcji lub gdzie możliwy jest kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi, należy używać kopert z tworzywa sztucznego w celu ochrony kasety przed bezpośrednim kontaktem z pacjentem. Koperta nie może być zmarszczona, aby na obrazie nie pojawiały się ślady jej zagnieceń.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wybór i opis odpowiedniej procedury i zasad dezynfekcji należy do obowiązków użytkownika.