



Desinfecção das cassetes

Para desinfetar as cassetes, utilize apenas desinfetantes aprovados pela Agfa (consulte a lista de desinfetantes aprovados). Se tencionar utilizar outros desinfetantes, é necessária a aprovação da Agfa, pois a grande maioria dos desinfetantes pode danificar a cassette. A desinfecção por UV também não é permitida.

Para informações detalhadas sobre como fazer a desinfecção, consulte as instruções de utilização que acompanham o desinfetante.

Instruções de segurança para a desinfecção

AVISO:

Antes de desinfetar a cassette, retire a chapa de imagem e verifique se a cassette está limpa.



Quando for necessário, pode limpar o exterior das cassetes, de preferência apenas com um pano molhado (em água e sabão).

AVISO:

Não utilize o líquido de limpeza CR Phosphor Plate Cleaner, os toalhetes PROSAT, o produto de limpeza para ecrã CURIX da AGFA nem nenhum líquido que contenha álcool para limpar a superfície da cassette, pois pode danificar esta última.



AVISO:

Nunca derrame ou pulverize líquidos diretamente na superfície da cassette; utilize sempre um pano limpo que não largue fios humedecido (e não a pingar) na solução.



AVISO:

Use em áreas bem ventiladas.





AVISO:

Os panos/soluções de desinfecção podem causar irritações nos olhos e na pele. Depois da utilização, lave as mãos com água e sabão. Consulte as Fichas de dados de segurança do material (MSDS) e as recomendações existentes na etiqueta do produto para obter as informações necessárias antes da utilização.



AVISO:

Verifique se a cassete está correctamente descontaminada e desinfetada antes do envio.



Antes de voltar a pôr as cassetes a uso verifique se todas as superfícies estão bem secas.



Siga as instruções de utilização fornecidas com o produto de limpeza ou desinfecção.

Desinfetantes aprovados

Os desinfetantes indicados abaixo são considerados compatíveis com o material da cassete e podem ser utilizados na superfície exterior da mesma.

Desinfetante à base de ácidos orgânicos:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (toalhetes ou spray) (multiGREEN® é uma marca comercial da ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Desinfetante à base de sal de amônio quaternário:

- toalhetes sensíveis mikrozid® (mikrozid é uma marca comercial da Schülke&Mayr GmbH)
- Toalhetes descartáveis Sani-Cloth® Active (Sani-Cloth é uma marca comercial da PDI®)

**PRECAUÇÃO:**

A utilização frequente de um desinfetante à base de sal de amónio quaternário pode resultar na quebra de partes da cassette. Por conseguinte, evite a utilização frequente. É recomendável limitar a utilização a < 50 vezes ao longo da vida útil da cassette.

Utilização de um envelope de plástico de proteção

Se utilizar a cassette num ambiente em que a desinfeção seja necessária ou onde possa entrar em contacto com sangue ou outros fluídos corporais, utilize envelopes de plástico para proteger a cassette do contacto directo com o paciente. Verifique se o envelope de plástico não está enrugado, para evitar que os vincos apareçam na imagem.

Limitação de responsabilidade

A selecção e descrição da política e procedimento de desinfeção adequados são da responsabilidade do utilizador.